

Le nouveau Titan® de Cutera® vous donne une option entièrement naturelle d'inverser activement les effets du temps sur une peau vieillissante.

En utilisant l'énergie lumineuse pour stimuler une nouvelle croissance de collagène, en profondeur, sous la surface cutanée, Titan peut raffermir votre peau, sur le visage, les bras, l'abdomen et les jambes.

C'est une solution idéale pour vous donner une apparence jeune et en bonne santé, sans chirurgie ni période de récupération ni injections.

titan®



RAFFERMISSEMENT
DE LA PEAU

CUTERA™

SIÈGE SOCIAL (MONDIAL)
3240 Bayshore Boulevard, Brisbane CA 94005, États-Unis
Téléphone : 1-888-4CUTERA | www.cutera.com

© 2012 Cutera, Inc. Tous droits réservés. Titan et Cutera sont des marques déposées de Cutera, Inc.

AP0287F Rev A (04/12)

CUTERA™

Raffermisssement cutané avec Titan

Comment fonctionne Titan de Cutera ?

Titan utilise une lumière infrarouge sans danger pour réchauffer le derme bien en dessous de la surface de la peau. Ce réchauffement peut entraîner une contraction immédiate du collagène se traduisant par une peau plus ferme. Pendant la procédure, la surface de la peau (l'épiderme) est protégée grâce à un refroidissement continu assuré par la pièce à main du Titan. Après la procédure, la nouvelle croissance de collagène continue de raffermir la peau, en atténuant son relâchement, ses plis et ses rides.

La différence Titan

Titan utilise de l'énergie lumineuse parce qu'elle procure une distribution plus uniforme de l'énergie pour réchauffer le derme profond que les autres sources d'énergie, comme la radiofréquence (RF).

Quelles zones répondent le mieux à la procédure Titan ?

De nombreux patients ont été traités avec succès sur différentes zones de leur corps où la peau était relâchée. Le relâchement de la peau le long de la mâchoire, sous le menton, sur l'abdomen et en haut des bras, a particulièrement bien répondu à la procédure.

Qui peut être traité ?

Dans la mesure où la procédure Titan consiste à réchauffer le tissu sous la surface de la peau, tous les types de peau peuvent être traités. Hommes et femmes de tous âges et de tous types de peau sont des candidats potentiels au traitement. Votre médecin peut vous conseiller et vous dire si le Titan vous convient.

De combien de séances aurai-je besoin ?

Une seule séance a produit de très bons résultats chez certains patients. Votre médecin vous indiquera le nombre et la fréquence des séances recommandés pour vous permettre d'obtenir des résultats optimaux.

Que se passe-t-il après une séance ? Y a-t-il des effets secondaires ?

Immédiatement après le traitement, vous pouvez constater une légère rougeur et un gonflement discret de la zone traitée. Les deux devraient disparaître en quelques heures. Consultez votre médecin pour recevoir des informations complètes sur les avantages et les risques du traitement.

Au bout de combien de temps les résultats seront-ils visibles ?

Certains patients constatent des résultats immédiats. Cependant, pour la majorité des patients, les résultats apparaissent progressivement au cours d'une période de trois à six mois, avec la formation de nouveau collagène et le raffermissement de la peau.

Que ressent-on lors des traitements ?


Vous ressentirez une brève sensation de chaleur à chaque pulsation du Titan. Certains patients sont plus à l'aise s'ils prennent un analgésique léger avant la procédure. De nombreux patients n'ont recours à aucun médicament. Votre médecin vous conseillera.

Le Titan a-t-il été testé et approuvé ?

Le Titan a été soigneusement étudié dans des cliniques dans le monde entier. Il est autorisé pour le traitement des rides en Europe et pour un usage dermatologique général au Canada. Aux États-Unis, il est autorisé pour l'obtention d'un réchauffement externe destiné à augmenter la température locale des tissus et la circulation. Un agrément supplémentaire 510(k) est en instance aux États-Unis pour le traitement des rides.



Avant

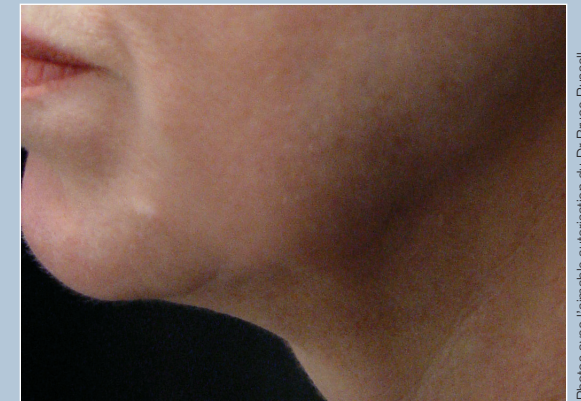

Après le 2^e traitement

Photos avec l'aimable autorisation du Dr Bruce Russell

Prenez dès à présent rendez-vous pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une procédure avec Titan.

www.titanskin.com